

PLUS

WWW.ROTAID.COM 



**PHYSIO
CONTROL**

 **ROTAID™**
AED CABINETS

ROTAID PLUS

FICHE PRODUIT

La Rotaïd Plus est une armoire murale DAE (défibrillateur automatisé externe) solide et résistante garantissant un stockage reconnaissable et durable de votre appareil DAE. Son design et sa forme ronde caractéristiques la rendent facilement identifiable et une simple rotation du couvercle vous permet d'avoir libre accès au DAE. Le couvercle est pourvu des logos DAE et des flèches de direction afin de ne laisser place à aucune ambiguïté.



Il est possible d'ouvrir l'armoire grâce à un mouvement rotatif intuitif retirant l'ensemble du couvercle. Par conséquent, le secouriste a libre accès au DAE suspendu via des pattes de fixation pour une prise en main rapide et simple. Le couvercle est attaché à la plaque signalétique via une lanière et ne nécessite aucune attention supplémentaire de la part du secouriste. Un crochet en acier inoxydable, attaché à l'arrière de l'armoire, peut soutenir un joint, une balise ou un autre dispositif.

Le couvercle, pourvu de flèches de direction et d'encoches pour une prise en main optimale, est constitué de Polycarbonate à 100 %. Avec une épaisseur de 5 millimètres, il offre une protection solide et garantit un niveau élevé de résistance à l'eau et à la poussière. En outre, le couvercle est muni de filtres UV, afin d'être protégé des rayons directs et indirects du soleil.




Un système d'alarme sonore avertit les passants et se déclenche lors de l'ouverture du couvercle. Il est alimenté par deux piles AAA et ne nécessite donc pas d'électricité.



Grâce à des techniques de production modernes et l'utilisation de plastiques recyclés, la Plus répond aux exigences les plus élevées en matière de durabilité.

ROTAID PLUS

DÉTAILS TECHNIQUES

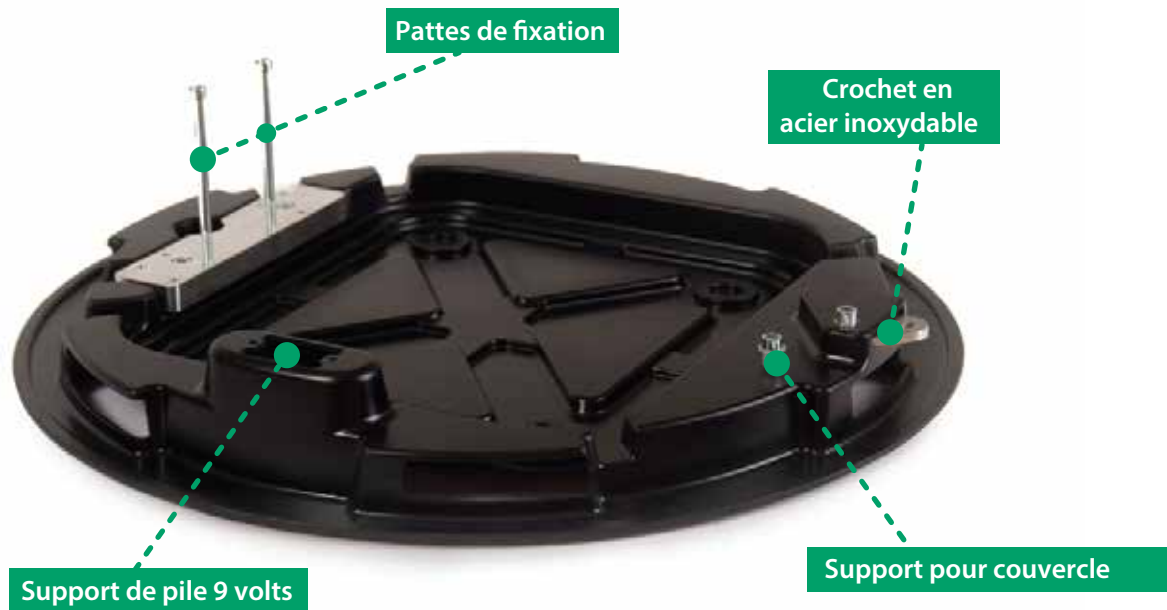

La Plus peut accueillir tous les DAE Physio-Control, incluant les "DAE et les défibrillateurs LIFEPAK® et HeartSine®.

Disponible en 4 couleurs (vert, rouge, blanc, jaune)



DIMENSIONS

Longueur **47 cm** Largeur **47 cm** Profondeur **18 cm** Poids **1,7 kg**

Emballée dans une boîte individuelle, matériaux de fixation inclus.

ROTAID PLUS

FICHE DE SPÉCIFICATIONS

USAGE: intérieur. **ATTENTION : non destiné à un usage extérieur !**

DIMENSIONS

Longueur **47 cm** Largeur **47 cm**
Profondeur **18 cm** Poids **1,7 kg**

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

ABS (Acrylonitrile butadiène styrène) 100 % recyclé, 4 mm d'épaisseur

Bloc support en aluminium solide avec adaptateur de montage pour accueillir 2 boulons DIN 912 8.8 EV M6x80 (inclus) pour un placement optimal du défibrillateur.

Crochet en acier solide à l'arrière pour installer un joint de protection, des instructions ou autres accessoires.

5 positions de montage pour une fixation ferme. 5 vis DIN 7981 A2 5,5 x 60 mm et 5 bagues DIN 9021 A2 M6x18x1,6 mm sont incluses pour l'installation sur tous les murs.

COUVERCLE

Polycarbonate 100 % recyclé, 5 mm d'épaisseur, entièrement transparent, muni de filtres UV pour une transparence longue durée et un blocage des rayons UV.

Une lanière en nylon est attachée au couvercle et reliée à la plaque signalétique. La ceinture en nylon mesure environ 15,75 pouces de long et 2 pouces d'épaisseur et est munie de bagues en laiton.

4 flèches de direction fournissent une aide à l'ouverture de l'appareil.

6 encoches permettent la prise en main pour une ouverture rapide et solide.

Couleurs disponibles : vert, jaune, rouge, blanc

ALARMSYSTEM

Le système sonore 90 dB déclenché par un aimant à basse puissance de la taille d'une pièce de monnaie dans le couvercle, dispose d'un boîtier ABS et est pré-installé puis fixé sur la plaque signalétique.

L'alarme fonctionne avec 2 piles AAA.

Un bouton de réinitialisation est situé en haut de l'alarme afin d'interrompre le système d'alarme si nécessaire.

EMBALLAGE

Boîte blanche, FEFCO 0201, répondant aux exigences FSC.

Dimensions de la boîte : 50 x 50 x 25 centimètres.